

BIP Bactiguard 预防感染

弗利氏导尿管

提供院内感染预防措施



独特技术，为患者安全保驾护航

导管相关性泌尿系统感染 (CAUTI) 在院内感染 (HAI) 中占很大比例，这些感染可导致严重并发症，如败血症，不但增加了患者痛苦，而且导致死亡率和医疗费用都大大增加。此外，许多这类感染需要使用抗生素治疗，从而增加了多重耐药菌出现及蔓延的风险。

BIP 弗利氏导尿管是具有 Bactiguard® 涂层的乳胶留置导尿管。自 1995 年以来，Bactiguard® 技术已在美国、英国、日本及其他国家成功地应用于预防院内感染。

Bactiguard® 的优势：

通过与医疗服务提供商密切合作，Bactiguard 的独特技术和解决方案，可以迅速、有效地减少感染风险，从而达到以下目的：

- 增加患者的安全性
- 减少抗生素的使用
- 降低医疗成本

用法：

BIP弗利氏导尿管用于膀胱导尿及冲洗。

材料：

BIP弗利氏导尿管是具有Bactiguard®涂层的乳胶留置导尿管。它还具有水凝胶涂层，以便于插入和拔除导尿管。在使用过程中，水凝胶能够降低导管材料和尿道之间的摩擦和磨损。

BIP-Bactiguard 感染防护：

Bactiguard Infection Protection (BIP)是一个非常薄的涂层，永久地附着在医疗器械表面。该涂层含有贵金属金，钯和银。其厚度仅有一毫米的百万分之几，持续地在导管表面发挥作用。它独特的作用机制能够减少细菌在Bactiguard®涂层表面的粘附，且无任何药理或毒性作用，更重要的是可以预防院内感染及减少抗生素的使用。

Bactiguard®-临床证实有效：

自1995至2011年，超过80,000名患者参与了Bactiguard®涂层产品的临床研究，结果证实该项技术降低菌尿的发生率高达73%^{1,2}，且具有很好的组织相容性。在临床上，已有超过10亿的患者使用过Bactiguard®涂层导尿管，且从未发生过与涂层相关的不良事件。研究还证实，该涂层不会增加细菌耐药性³。

环境保护：

Bactiguard®涂层是环保产品，无需特殊程序处理、使用及弃置，与无涂层导尿管方法相同。

参考文献：

1. Schumm K et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD004013.
2. Stenzelius K et al., Scand J Urol Nephrol. 2011 Sep;45(4):258-64.
3. Rupp MD, et al., Am J Infect Control. 2004 Dec;32(8):445-50.

BIP弗利氏导尿管规格

编号	规格	尺寸 (Fr/Ch)	球囊体积 (ml/cc)	长度 (cm)
111080310	双腔 儿科	8	5	30
111100310	双腔 儿科	10	5	30
111120510	双腔	12	10	40
111140510	双腔	14	10	40
111160510	双腔	16	10	40
111180510	双腔	18	10	40
111200510	双腔	20	10	40
111220510	双腔	22	10	40
111240510	双腔	24	10	40
111260510	双腔	26	10	40
111280510	双腔	28	10	40
111300510	双腔	30	10	40
111123010	双腔	12	30	40
111143010	双腔	14	30	40
111163010	双腔	16	30	40
111183010	双腔	18	30	40
111203010	双腔	20	30	40
111223010	双腔	22	30	40
111243010	双腔	24	30	40
111263010	双腔	26	30	40
111283010	双腔	28	30	40
111303010	双腔	30	30	40
112163010	三腔	16	30	40
112183010	三腔	18	30	40
112203010	三腔	20	30	40
112223010	三腔	22	30	40
112243010	三腔	24	30	40
112263010	三腔	26	30	40

该产品具有欧盟CE标示

盒装



无菌包装

- 消毒及贮存：见包装。
- 盒装：10支 运输装：10×10支
- 盒装尺寸：
(10×10标准) 宽×高×深：
515×90×45毫米

 **Bactiguard**
Coating For Infection Protection

Bactiguard AB

办公室地址 瑞典 斯德哥尔摩 102 42, 5070 邮箱
访问地址 瑞典 斯德哥尔摩, Biblioteksgatan 25
电话 +46 (0)8 440 58 80 · 传真 +46 (0)8 440 58 90
www.bactiguard.com · info@bactiguard.com